

# Maandelijks controles/onderhoud

Versie 2024



## Dit zijn de handelingen:

Open de kast met de bekend zijnde code. (4 cijfers en bevestigen met een V)

De 2 witte LED's moeten nu continue branden en de 2 rode LED's continue knipperen.

Druk één voor één op alle toetsen en voel of deze goed te bedienen zijn. Luister tijdens het indrukken of een duidelijk "bleep" signaal te horen is.

Verwijder het gewenst stof / vuil uit de kast met een zachte doek of kwastje.

Neem de AED uit de kast.

Open NIET de klep van de AED

Controleer of het groene lampje brandt.

Indien dat het geval is dan is de AED inzetbaar.

Indien dat niet het geval is dan maakt u een melding van zoals op de witte sticker op de AED/kast staat vermeld.

Zet de AED goed terug in de kast en zorg dat het rode hesje niet voor het transparante gedeelte van kast zit (boven op de AED is de beste plek).

Sluit de kap weer goed en check of deze is vergrendeld. Om te sluiten hoeft u de code niet in te tikken- De kap moet zowel links en rechts aan de buitenzijde goed in de vergrendeling vallen. Zorg ervoor dat de AED altijd goed bereikbaar is, ook buiten de openingstijden.

## Extreme weersomstandigheden (warm / koud)

- Als de kast te warm wordt gaat de ventilator automatisch aan om de kast geforceerd te ventileren.
- Wordt daarnaast de ingestelde boven-limit overschreden, dan gaan de RODE LED's 4x knipperen even rust, 4x knipperen even rust enz. enz.  
Dit kan geen kwaad maar naar verloop van tijd (afkoelen omgevingstemperatuur) moet dit knipperen en het lopen van de ventilator ophouden.
- Als de kast te koud wordt gaat het verwarmingselement aan. (ventilatortje is hoorbaar)
- Is de kast op temperatuur dan wordt het verwarmingselement weer uitgeschakeld. Dit gaat continue door (aan / uit) totdat de omgevingstemperatuur is toegenomen.  
Wordt daarnaast de ingestelde onder-limit overschreden, dan gaan de RODE LED's 4x knipperen even rust, 4x knipperen even rust enz. enz.
- De verwarming kan dan de buiten kou niet bijhouden en het is beter de AED er tijdelijk uit te halen of de kast wat tegen de kou te beschermen om schade aan de AED te voorkomen. Waarschuw in dit geval altijd ook de Technische Commissie.